Dipartimento Medico Polispecialistico 1

Unità Operativa Genetica Medica

Laboratorio di immunogenetica Accreditato EFI

MODALITA' PER IL PRELIEVO E L'INVIO DEI SIERI PER LA RICERCA PERIODICA DEGLI ANTICORPI CITOTOSSICI

I pazienti in lista di attesa per trapianto renale presso la lista unica della regione Emilia Romagna devono inviare i sieri per la ricerca degli anticorpi citotossici al laboratorio di immunogenetica di Parma con cadenza trimestrale secondo le seguenti modalità:

QUANDO: entro i primi 10 giorni dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

MODALITA' DI PRELIEVO:

- 1. il paziente deve essere a DIGIUNO da almeno 4 ore
- 2. il prelievo deve essere eseguito PRIMA della seduta dialitica
- 3. prelevare 7-8 ml di sangue e trasferirlo in una provetta PRIVA DI ANTICOAGULANTE

MODALITA' PREPARAZIONE SIERO:

- 1. lasciare sierare a temperatura ambiente per almeno 2 ore avendo cura di rimuovere il coagulo
- 2. centrifugare per 5 min a 3000 giri oppure 10 min a 2500 rpm
- trasferire il siero, ponendo attenzione a non trasportare residui di fibrina, in 2 provette tipo eppendorf safe
 -lock da 1,5 ml (vd allegato 1), non superando la quantità massima di 1 ml (NB:se il siero risultasse
 emolizzato ripetere il prelievo)

IDENTIFICAZIONE SIERO:

- apporre su ciascuna eppendorf le etichette prestampate fornite dal laboratorio di immunogenetica di Parma (unico invio annuale)avendo cura di aggiungere, di fianco al mese e anno prestampato, il giorno esatto del prelievo
- 2. per i pazienti di cui non fossero disponibili le etichette prestampate utilizzarne di autoadesive,possibilmente scritte a computer riportando centro dialisi (provenienza),cognome-nome,data di nascita e data(gg/mm/aa)prelievo

Provenienza
Cognome
Nome
gg/mm/aa
gg/mm/aa

Es:	Parma
	Rossi
	Mario
	23/10/1954
	01/02/2010

NB:I SIERI CHE NON PERVERRANNO NEI TEMPI E NEI MODI INDICATI,VERRANNO CONSIDERATI NON INVIATI E ,CONSEGUENTEMENTE, IL PAZIENTE VERRA' TEMPORANEAMENTE SOSPESO DALLA LISTA ATTIVA.

Qualora il paziente venga sottoposto a trasfusione di sangue,altri emoderivati o espianto di precedente trapianto dovrà essere eseguito un ulteriore prelievo da inviare al laboratorio di immunogenetica di Parma accompagnato da richiesta con specifica della motivazione,indipendentemente dall'invio periodico,rispettando la seguente tempistica:

in caso di trasfusione, eseguire il prelievo a distanza di 15 giorni; in caso di espianto, eseguire il prelievo a 7 e 15 giorni dall'intervento

DOVE INVIARE I SIERI:

LABORATORIO DI IMMUNOGENETICA

U.O. GENETICA MEDICA

DIPARTIMENTO ONCO-EMATOLOGICO INTERNISTICO (PAD. 27, IV Piano)

VIA GRAMSCI 14

43126 PARMA

COME INVIARE:

- a temperatura ambiente
- busta imbottita
- invio cumulativo:riunire i campioni dei pazienti del centro dialisi e provvedere ad un unico invio(nell'attesa i campioni possono essere congelati fino alla data di spedizione,nel caso tale procedura deve essere segnalata)

MEZZO DI SPEDIZIONE: mezzo dell'azienda/ posta celere/ corriere espresso (porto franco), mezzi che comunque garantiscano la consegna entro le 24 ore dalla spedizione

IMPEGNATIVE DA ALLEGARE:

inviare n° 2 impegnative:

- 1. ricerca anticorpi anti HLA citofluorimetrica(pre trapianto)per 8,cod.90.73.5
- ricerca periodica anticorpi anti-HLA (panel di 30 cellule),cod 90.67.4 e crioconservazione siero pretrapianto.cod. 90.60.4

firmate dal medico (e dall'assistito se fuori regione ER). Compilare le impegnative in modo corretto e comprensibile, preferibilmente a computer.